

機械器具69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 特定保守医療機器 JMDN:31806009

シーブライトⅢ ホワイトニング

【禁止事項】

- 1、目的以外の使用禁止：歯科診療の治療以外には使用しないこと。
- 2、注意事項の厳守：器具の正しい使用の為、注意事項を必ず守ること。
- 3、異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【形状・構造等】

1外観



2仕様

電源 100V-260V 50/60Hz
消費電力 3W
電撃の保護（本体）内部電源機器、BF形機器

【使用目的、効果、又は効能】

歯面の漂白を行うために使用する

【品目仕様等】

光出力 波長420～500nm 最大出力 1800mw/cm²
光源 LED

【操作方法又は使用方法】

詳細は取扱説明書を参照のこと。

- ①照射時間を設定する
 - ②電源ボタンを押して治療を開始する。
- 照射方法
- ①電源ボタンを入れる。電子音1回
 - ②照射時間を設定。
 - ③照射したい部位に照射ガイドと照射対象の漂白材に触れることなく漂白材が照射ガイド先端に付着しないよう注意して近づける。
 - ④スタートボタンを押して治療を開始する。
 - ⑤途中で治療を中断したい時は一時停止ボタンを押す。再び押せば、継続照射する。
 - ⑥設定時間になると自動的に停止し、設定した条件はメモリーされる。
 - ⑦治療が終了すると、電子音が1回鳴り、設定条件が終了したことを知らせる。
 - ⑧電子音が1回鳴った後、約1分間冷却用のファンが稼働する。

【使用上の注意：】

- ① 本製品は歯科用の可視光線重合照射器のため、歯科治療目的のみ使用すること。
- ② 本製品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③ 初めて本製品を使用するときは、使用説明書に基づいて、術前に操作確認してから使用すること。
- ④ 使用説明書記載の注意事項をよく読んで、厳守すること。

- ⑤ 光過敏性を誘発する薬剤を使用している患者や光過敏性反応をおこしたことがある患者には使用しないこと。
- ⑥ 漂白材は保存条件や保存期間により漂白時間が変わるので、サンプルを試験的に漂白させ、もし通常照射時間で漂白しない時は、使用を中止して廃棄すること。
- ⑦ 光照射のライトは直視しないこと。保護メガネを術者、患者共に着用して使用すること。
- ⑧ 連続使用すると、本体内の温度センサーの働きにより自動的に照射を停止するので冷却時間をとって使用する
- ⑨ 連続使用で過熱している時は接触などで火傷をしないように注意する。
- ⑩ 可燃性の麻酔薬などを使用した患者や可燃性物質の近辺では使用しないこと。
- ⑪ 白内障や網膜障害のある患者に使用するときには、眼科医に相談してから使用すること。
- ⑫ 照射する際、使用する漂白材料は、メーカーやシェードによって照射時間を確認する必要があるため、新たに使用する時は試験的にサンプルを照射させて、照射時間を確認してから使用する。

【保守、点検に関わる項目】

詳細は取り扱い説明書を参照のこと

使用者が日常行う手入れ法

- ①照射ガイドの汚れは、エチルアルコール、中性洗剤などでふき取る。
- ②破損や傷などがあれば、新しいものと交換する。
- ③照射口面に漂白材が付着していないか調べる。
付着している場合はスバラチャなどでガラス面が傷つかないように慎重に取り除く。研磨剤や金属製の道具を使用しないこと。

（本体）

本体は中性洗剤を含んだ布などで拭く。
洗剤や水を直接かけないこと。また有機溶剤の使用も避ける事。
傷や破損などの異常があれば新しい物と交換する
汚れは、エチルアルコール、中性洗剤などでふき取る
消毒する時は、グルタール製剤、塩素系消毒剤などの殺菌消毒剤は使用しないこと。
本品には、業者に、定期的に依頼しなければいけない保守はない。

【包装】

本体、電源コード等を一式梱包

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 ビヤス株式会社
住所 〒132-0035
東京都江戸川区平井6-73-9
電話番号 03-3619-1441
FAX 03-3619-1443

製造元 COXO MEDICAL INSTRUMENT CO, LTD
(国名 中国)