

類別:機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 一般の名称:歯科用根管口拡大ドリル
JMDN:31876000
販売名:リーマーT

【禁忌・禁止】

〈適用対象〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意:「もらい錆」の原因となるので、錆びている器具や化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。高温多湿の場所は避けること。

【形状・構造及び原理等】

1. リーマーTは、穿孔を防ぐため先端に刃の無いパイロット(突起)があり、約3度のテーパ角度と三枚の切れ刃からなるコントラングル(CA)タイプの電動用根管器具である。

針部全長	15mm±0.5mm	20mm±0.5mm
軸部直径コントラングル部	2.35mm	JIS T5540
種類(サイズ)No.1~6		15mm±0.5mm
No.1~6		20mm±0.5mm

主原料 JIS G 4309 ステンレス鋼線

【使用目的又は効果】

1. リーマーTは、低速回転操作で歯冠側2/3から根管中央部のロート状に拡大(根管口拡大)するのに効果的である。

【使用方法等】

1. 用途に応じた種類を選びハンドピースに装着し低速で使用すること。

【使用上の注意】

1. ステンレス鋼使用:素材のステンレス鋼は炭素鋼に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によって錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
2. 禁忌の薬剤:次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリンフェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
3. 家庭用洗剤の使用禁止:家庭用洗剤は、金属を腐食させる事があるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
4. 機能水の使用禁止:超酸化水(強酸性水)等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
5. 洗浄・消毒・滅菌上の注意:洗浄・消毒・滅菌には、精製水を使用する事が望ましい。
 - ・薬液消毒を行う時は薬剤の添付文書の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属を腐食劣化させる場合がある。
 - ・加熱滅菌器(オートクレーブなど)の消毒温度に注意すること。高温の乾燥は金属を劣化させる場合がある。
 - ・洗浄、消毒、滅菌後の乾燥は速やかに短時間で確実にすること。水分の付着は、錆、シミの原因になることがある。
 - ・直火や高熱め滅菌器(ガラスビーズ滅菌器など)の中に入れると金属を劣化させる事がある。
6. 保管上の注意:「もらい錆」の原因となるので、錆びている器具や化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。高温多湿の場所は避けること。
7. 取り扱いについて:器具の矯正(ねじり戻し、曲げ戻し)は、器具の破損の原因となるので、行わないこと。

【保守・点検に関わる事項】

1. 使用前、使用後の点検:器具の変形・錆・傷・ひび等が無いが確認すること。
2. 器具を補助器具・装置に装着して使用する場合は、その補助器具・装置の添付文書に従い正しく使用すること。
3. 使用後の器具は、滅菌後感染性廃棄物として処理すること。

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: ビヤス株式会社
住所: 〒132-0035
東京都江戸川区平井6-73-9
TEL: 03-3619-1441
FAX: 03-3619-1443

製造元: ビヤス株式会社
住所: 〒132-0035
東京都江戸川区平井6-73-9
TEL: 03-3619-1441
FAX: 03-3619-1443