

医療用品 04 整形用品  
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 (38609000)

## キューピーファイバーポストプラスリフィル

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

○再使用禁止

<適用患者>


○本品で使用された原材料に、過敏症等の既往歴のある患者

○本品を直線的に植立できない患者

### 【形状・構造及び原理等】

1.形状:

インジケータ ポスト本体 先端はテーパ形状である。

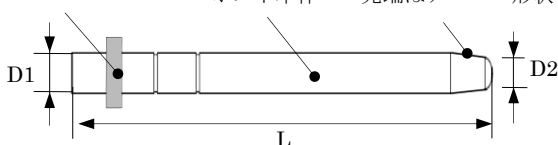

\*\*2.寸法

型番	L	D1	D2	インジケータ色
QPA9	20mm	φ 0.9mm	φ 0.7mm	ブラウン
QPA10	20mm	φ 1.0mm	φ 0.8mm	イエロー
QPA14	20mm	φ 1.14mm	φ 0.6mm	ブルー
QPA20	20mm	φ 1.2mm	φ 0.65mm	グリーン
QPA25	20mm	φ 1.25mm	φ 0.7mm	レッド
QPA40	20mm	φ 1.4mm	φ 0.75mm	パープル
QPA50	20mm	φ 1.5mm	φ 0.8mm	グレー
QPA55	20mm	φ 1.55mm	φ 0.8mm	オレンジ
QPA80	20mm	φ 1.8mm	φ 0.9mm	ホワイト
QPA200	20mm	φ 2.0mm	φ 0.9mm	グレー

3.材質

- ガラス繊維
- エポキシ樹脂

4.仕様

試験項目	規格
曲げ強さ	800MPa 以上
X線造影性	アルミニウム 2.0mm 以上
光透過性深度	深度 15mm 以上

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科修復物、補綴物等の維持又は補強に用いる。

### 【使用方法等】

1.使用前の準備:

- 1) X線撮影等で根管の状態を確認し、通法に従い根管形成・根管充填を行う。
- 2) 根管のサイズに応じて、使用する本品のサイズを決定する。

- 3) 本製品に併用する根管拡大用ドリルの目安は、使用する本製品より一回り大きいサイズを選択することが望ましい。

2.使用中の操作:直接法による支台築造

- 1) リーマ等で根管充填材を除去する。
- 2) ドリル等で本品の植立に必要な太さまで根管を拡大する。根管形成後は根管内の水洗を行い、確実に乾燥させる。
- 3) 本品を根管に試適し、目視又は X 線撮影等で確認を行いながら、本品の長さを決定する。長さが決定したら、インジケータの位置をずらしてマークしておく。
- 4) 本品を根管から外し、インジケータでマークした位置を目印に、不要な部分をダイヤモンドディスクで切断する。
- 5) 歯科用エッチング材、歯科用接着材の取扱説明書に従い、歯科用エッチング材、歯科用接着材を根管内に適用した後、歯科用セメント又は支台築造用コンポジットレジン<sup>1)</sup>の取扱説明書に従い、本品を根管に植立する。
- 6) 歯科用セメント又は支台築造用コンポジットレジン<sup>2)</sup>の取扱説明書に従い、支台築造を行う。

3.使用中の操作:間接法による支台築造

- 1) リーマ等で根管充填材を除去する。
- 2) ドリル等で本品の植立に必要な太さまで根管を拡大する。根管形成後は根管内の水洗を行い、確実に乾燥させる。
- 3) 通法に従い、歯科用印象材により印象の採得を行う。
- 4) 採得した印象をもとに口腔内の模型を製作し、模型上の根管に本品を試適し本品の長さを決定する。長さが決定したら、インジケータの位置をずらしてマークしておく。
- 5) 本品を模型上の根管から外し、インジケータでマークした位置を目印に、不要な部分をダイヤモンドディスクで切断する。
- 6) 模型に支台築造用コンポジットレジン<sup>1)</sup>の分離材(申請対象外)を塗布しておく。
- 7) 支台築造用コンポジットレジン<sup>2)</sup>の取扱説明書に従い、本品を模型上の根管に植立して重合硬化させ、レジンコアを作成する。
- 8) 完成したレジンコアを、歯科用セメント等を用いて患者に装着する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ポスト本体の切断は、必ずダイヤモンドディスクを用いること。
- アルコールスポンジを使用してポストを洗浄し、水と油が付着しないようにすること。

**【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- エポキシ樹脂に対し発疹、炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
- \*○必要に応じて窩洞形成前にラバーダム等の防湿処置を行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- 保管方法
  - ・直射日光を避けて保管すること。
  - ・異物が付着しないよう保管すること。
- 有効期間：3年

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ピヤス株式会社  
電話：03-3619-1441  
FAX：03-3619-1443  
製造業者：INNO DENTAL CO. LTD.