

類別: 機械器具63 歯科用ブローチ
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ブローチ
JMDN: 41865000

販売名: 丸ブローチ

【禁忌・禁止】

〈適用対象〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 本品はブローチホルダーに装着して使用する。
- 作業部先端から30mm±1.0mmまでの断面形状は円形。
- 針部全長52mm±1.0mm

種類(サイズ)	No. 000	ISO	No.15
	No. 00		**No.17
	No. 0		**No.20
	No. 1		No.25
	No. 2		**No.30
	No. 3		**No.35

・主原料 JIS G 3506 硬鋼線材

・対応日本工業規格及びISO規格

【使用目的又は効果】

- 丸ブローチは、断面が円形で、抜髄後の清掃及び消毒処置薬剤貼付又根管の探索に効果的である。

【使用方法等】

- 丸ブローチの種類を選び、ブローチホルダーに装着し綿を巻きつけて使用する。

【使用上の注意】

- 炭素鋼使用: 素材の炭素鋼は、使用方法・環境によって錆びるので以下の使用上の注意を守ること。
- 禁忌の薬剤: 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザトニウム、ポビドヨード、ホルマリンフェノール、グルコン酸クロールヘキシジンは、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
- 家庭用洗剤の使用禁止: 家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- 機能水の使用禁止: 超酸化水(強酸化水)等は金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- 洗浄・消毒・滅菌上の注意: 洗浄・消毒・滅菌には、精製水を使用する事が望ましい。(水道水は、塩素不純物が含有)
- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書の使用上の注意を守ること。薬液の種類によっては、金属を腐食劣化させる場合がある。
- 加熱滅菌器(オートクレーブなど)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、金属を劣化させることがある。
- 直火や高熱滅菌器(ガラスビーズ滅菌器など)の中に入れると金属を劣化させることがある。
- 取り扱いについて: 器具の矯正(捻り戻し、曲げ戻し等)は器具の寿命を著しく低下させるので避けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管上の注意: 「もらい錆び」の原因となるので、錆びている器具や化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。
- 開封後の*丸ブローチは錆が発生し易いので使用以外の製品は、必ずケースに入れ密封し、高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検: 器具の変形・錆び・キズ・ヒビ等が無いが確認すること。
- 器具を補助器具・装置に装着して使用する場合は、その補助器具並びに装置の添付文書に従い正しく使用すること。
- 感染予防の立場からできるだけ再使用は避けること。
- 使用後の器具は、滅菌後に感染性医療廃棄物として処理すること。

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: ピヤス株式会社
住所: 〒132-0035
東京都江戸川区平井6-73-9
TEL: 03-3619-1441
FAX: 03-3619-1443