

類別：機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 一般的名称：口腔洗浄器 JMDN 12304019

## 口腔内エアースプレー Fresh

### 【警告】

#### <使用方法>

1. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光のあたる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
2. 火の中に入れていないこと。

### 【禁忌・禁止】

1. 使い切って廃棄すること。廃棄するときは、火気のない屋外で、噴射音が消えるまでスパウトを押しガスを抜くこと。
2. 不燃性を必要とする所のみを使用すること。
3. 必要以上に使用しないこと。
4. ノズルは他の患者に再使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### <形状・構造>

##### 1. 構成

本品は以下のものから構成される。

- (1) 本体（充填物:1,1,1,2-テトラフルオロエタン  
HFC-134aガス 内容量120g）
- (2) ノズル(10本)
- (3) キャップ

##### 2. 形状



##### 3. 原理

本品は充填されているガスをノズルから口腔内に噴射し、口腔内の異物、唾液等を物理的に除去するものである。

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は口腔内の異物除去及び乾燥を行うために用いる。

### 【品目仕様等】

外観：本体外観にキズ等がなく、ノズルに折れが無いこと。  
可動性：スパウトが無理なく可動すること。

### 【操作方法又は使用方法】

#### (1. 使用前)

1. 本体上部のキャップを取る。
2. ノズルをスパウトに差し込む。

#### (1. 使用方法)

1. 口腔内にノズルを近づけ、スパウトを押し、ガスを噴射する。
2. 意図する噴射部位に届きにくい場合は、ノズルを曲げて使用する。
3. 1回の噴射を2秒程度とし、数回に分けて噴射する。

#### (3. 使用后)

1. 使用後はキャップをスパウトにかぶせ、保管する。

### 【使用上の注意】

1. 気化熱で本体が冷たくなることもあるので連続で長時間噴射をしないこと。
2. 開封後、初めて使用するときは、試し噴射を行う。本体を斜めあるいは逆さにして噴射しないこと。
3. ノズルは確実にスパウトに差し込むこと。

### 【貯蔵・保管方法および使用期限等】

#### <保管及び貯蔵方法>

1. 日光および高温多湿は避けて保管すること。  
保管条件：周囲温度 -10℃～40℃
2. 気圧、湿度、風通し、塩分、オゾン、硫黄分を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のある場所に保管しないこと。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

### 【有効期間・使用の期限】

本品は消耗品のため、充填物を使い切った後で廃棄すること。

### 【包装】

1セット / 1箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 【製造販売業者】

ピヤス株式会社  
東京都江戸川区平井 6-73-9  
連絡先 03-3619-1441

#### 【製造業者】

ピヤス株式会社  
東京都江戸川区平井 6-73-9

