

類別:機械器具 02 医療用照明器

一般医療機器 一般の名称:汎用歯科用照明器 J MDN:12351000

口腔内チェックミラー Misel

【禁止事項】

1. 目的以外の使用禁止: 歯科診療の治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守: 器具の正しい使用の為、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止: 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止: 器具の形態変更や改造等はしないこと。

【形状・構造等】

(1) 外観



(2) 寸法および重量

寸法 全長135mm ミラー部 W90mm×H60mm
持ち手部 W35mm×H75mm

重量 55g(電池含まず)

光源 LED(3灯)

【使用目的、効果、又は効能】

本品は口腔内の診断や指導を行う際など患者自身で口腔内確認の為に用いる照明付手鏡。

【使用方法】

本品は3倍拡大ミラーとLEDライトで患者の口腔内状態をより確認しやすくするために用いる。

(1. 使用前)

1. 単四電池2本を正しい方向に装着する。

(1. 使用方法)

- ① ボタンを押すと、LEDライトが点灯する。
- ② 鏡を見やすい位置で持ち、口腔内を照らす。
- ③ 終了後、ボタンを押すと消灯。(1分間の自動消灯機能付)

【使用上の注意】

1. 本体および鏡部が汚れた場合は硬く絞った布などで軽く水拭きする
2. LEDライト部は直視しないこと。
3. LEDライトが点灯しなくなった場合は電池を交換すること。

【保守、点検に関わる項目】

使用者が日常行う手入れ法

- ① 汚れは布等で軽く水拭きすること。
- ② 破損や傷などがあれば、新しいものと交換する。
- ③ 直射日光および高温多湿は避けて保管すること。
- ④ 化学薬品の保管場所やガス等の発生する場所に保管しないこと。
- ⑤ 長期間使用しない場合、電池は本体からはずしておくこと。

本体及び鏡部分の汚れは、絞った布(コットン・ガーゼ等)で軽く水拭きする。
洗剤や水を直接かけないこと。また有機溶剤の使用も避ける事。

【包装】

1セット/本体

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名	ピヤス株式会社
住所	〒132-0035 東京都江戸川区平井6-73-9
電話番号	03-3619-1441
FAX	03-3619-1443